

fauteuil de positionnement

Comp-Position

Série 0

LA SOMME DES DÉTAILS FAIT LA DIFFÉRENCE



FAUTEUILS
MÉDICALISÉS



COMP-POSITION 0-7

Montré en vinyle Silvertex Ice,
appui-bras amovibles (0A-03)
et roues de 13" (0E-01) en option



COMP-POSITION 0-07

Montré avec vinyle
Naugasoft Sapphire de série
et appui-bras amovibles
(0A-03) en option

CONFORT ET POSITIONNEMENT

Comp-Position

fauteuil de positionnement

Appui-tête profilé-articulé de série pour un meilleur support et alignement de la tête et du cou




Coussin d'assise PRÉ-CURE® composé de mousse à haute résilience et mousse visco gel à mémoire de forme

De série, ce coussin contribue à la prévention des escarres


Ajustements divers par boulonnage :

- Largeur de siège
- Hauteur siège/sol
- Largeur de dossier

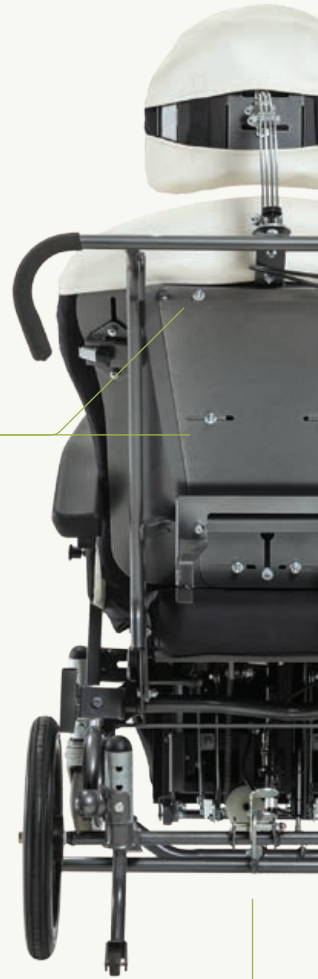

Fauteuil à 2 consignes

- Bascule globale
- Appui-jambes à compensation automatique par cylindre de blocage

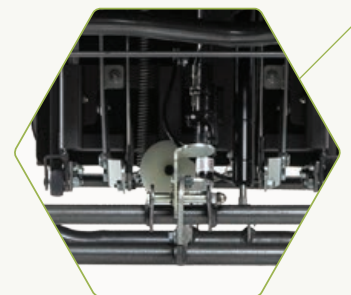


Roues arrière de 13"
en option (code 0E-01)
avec frein central

Ajustable et facilement ré-attribuable

- + répond aux plus hauts standards de positionnement, de confort et de sécurité.
- + s'adapte aux différentes morphologies et aux problèmes de posture.
- + permet des transferts sécuritaires tant de manière autonome qu'avec l'aide de lève-personne.
- + facilite la tâche des intervenants tout en aidant à réduire les risques d'accidents au travail.
- + réduit les inventaires et les coûts grâce à ses ajustements permettant la ré-attribution facile.



OA-03

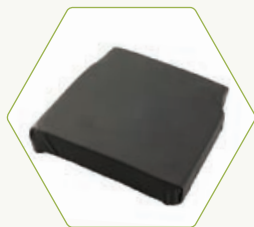

OA-04



OB-02



OB-05



OB-07



OC-01



OC-04



OD-02



OE-01

OPTIONS ET ACCESSOIRES

ITEM	DESCRIPTION
AE-02	Support universel à sac de drainage
OA-01	Coussins latéraux 1 1/2"
OA-03	Appui-bras amovibles
OA-04	Coussin PRÉ-CURE® PRO
OA-06	Coussin supplémentaire d'assise
OB-02	Dossier à tension ajustable
OB-03	Appuis latéraux 4" (10 cm) avec toile universelle
OB-04	Appuis latéraux 6" (15 cm) avec toile universelle
OB-05	Supports thoraciques
OB-06	Appuis-épaules
OB-07	Inclinaison du dossier avec cylindre au gaz de 98 à 135 degrés
OB-08	Coussin supplémentaire de dossier
OC-01	Table d'activité opaque
OC-02	Table d'activité transparente
OC-03	Coussin de recouvrement de table d'activités
OC-04	Support pour hémiplégique
OD-01	Coussin de recouvrement de palette d'appui-pieds
OD-02	Protecteurs latéraux de jambes
OD-03	Coussin élévateur d'appui-pieds
OE-01	Roues de 13" avec frein central
OE-03	Tige à soluté
OE-012	Freins latéraux pour roues 13"
RA-03	Sangles de retenue de table
RA-03A	Sangle de retenue englobante
RA-19	Ensemble butée d'abduction et toile d'installation

Recouvrement de base en vinyle, tissus Crypton et vinyle Silvertex disponibles en option.
Rencontre les normes de feu CATB117-2013.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Série 0
Largeur maximum	25 3/4" / 65,4 cm
Profondeur totale (fauteuil fermé)	34 1/2" / 87,6 cm
Profondeur totale (fauteuil ouvert)	65" / 165,1 cm
Hauteur hors tout	53 1/4" / 135,3 cm
Hauteur siège / sol	19" à 21" / 48,3 cm à 53,3 cm
Largeur d'assise entre appui-bras	16 1/4" à 19 1/4" / 41,3 cm à 48,9 cm
Profondeur d'assise	15 1/2" à 19 1/2" / 39,4 cm à 49,5 cm
Hauteur dossier	22 1/2" / 57,2 cm
Hauteur dossier avec appui-tête	34" / 86,4 cm
Longueur de l'appui-jambes (fermé)	16 1/2" à 18 1/2" / 41,9 cm à 47 cm
Extension de l'appui-jambes	4 3/4" à 5 3/4" / 12 cm à 14,6 cm
Hauteur des appui-bras	7 1/4" à 12 1/4" / 18,4 cm à 31,1 cm
Bascule globale d'assise maximum	45 degrés
Angle siège / dossier	90 à 115 degrés
Poids total sans accessoires	104 lbs / 47 kg
Capacité	250 lbs / 113,4 kg

Veuillez noter que les caractéristiques techniques sont sujettes à changement sans préavis.

notre gamme complète

SUPPORT À L'AUTONOMIE

THERA-GLIDE®
BOIS



THERA-GLIDE®
MÉTAL



THERA-GLIDE®
TRANSITIONNEL



DYN-ERGO



NOMADE



VERSATILE



ÉVOLUTION



UTILITÉ



CONFORT ET POSITIONNEMENT

COMP-POSITION



HARMONIE



OPTIMUM



ACCESSOIRES

COUSSIN
PRÉ-CURE® PRO



SURFACES
ANTI-GLISSEMENT



Visitez notre site Web ou contactez-nous pour plus de détails sur notre gamme de produits.

lpa+

lpamedical.com

2527, avenue Dalton, Québec (Qc) G1P 3S6
T 418 681-1313 1 800 663-4863 F 418 681-4488