

fauteuil de positionnement

Optimum

Série 1400

LA SOMME DES DÉTAILS FAIT LA DIFFÉRENCE



FAUTEUILS
MÉDICALISÉS



MANUEL D'INSTRUCTION

lpamedical.com

2527, avenue Dalton, Québec (Qc) G1P 3S6
T 418 681-1313 1 800 663-4863 F 418 681-4488

MOT DE REMERCIEMENT

Félicitations et merci pour l'achat de votre fauteuil médicalisé LPA Médical.

Depuis 1989, LPA Médical se dévoue à la conception et à la fabrication de fauteuils adaptés aux demandes et exigences les plus rigoureuses du milieu de la santé. Nos produits sont conçus avec le confort et la durabilité à l'esprit, autant dans les unités de soins de longue que de courte durée. Nous sommes fiers de fabriquer des produits de qualité qui intègrent des fonctionnalités avancées dans un design esthétique qui respecte la dignité de l'utilisateur.

Lisez attentivement ce manuel d'instructions et consultez-le souvent afin de maximiser les bénéfices que votre fauteuil LPA vous apportera. Suite à cette lecture, si vous avez des questions n'hésitez pas à contacter votre représentant LPA, à nous contacter directement via notre site web ou via notre ligne téléphonique listée ci-bas.

Nous espérons que vous apprécierez votre fauteuil LPA Médical et nous vous remercions pour votre confiance.

Bryan Welch
Président

LPA Médical inc.
2527 avenue Dalton,
Québec, QC, Canada G1P 3S6

T: 418-681-1313
F: 418-681-4488
Sans frais: 1-800-663-4863

info@lpamedical.com
www.lpamedical.com

TABLE DES MATIÈRES

Mot de remerciement.....	2
Politique de disponibilité des pièces de remplacement.....	3
Information générale.....	4
Définitions.....	4
Mesures de sécurité.....	5
Applications.....	5
Inspection avant utilisation.....	6
Préventions des risques.....	6
Usages inappropriés.....	7
Nettoyage.....	7
Entretien.....	7
Instructions d'ajustements et d'opérations.....	8
Roues.....	8
Profondeur d'assise.....	10
Bascule.....	11
Appui-jambes élévateur.....	13
Dossier.....	16
Appuis-bras ajustables et escamotables.....	18
Appui-tête profilé articulé.....	19
Ailettes latérales ajustables.....	20
Supports thoraciques structuraux ajustables.....	22
Termes & conditions.....	23
Général.....	23
Transport.....	23
Retour de marchandise.....	23
Garantie.....	24
Engagement.....	24
Exclusion.....	25
Liste des pièces.....	26
Vue éclatée.....	28

POLITIQUE DE DISPONIBILITÉ DES PIÈCES DE REMPLACEMENT

LPA Médical a une politique de disponibilité de pièces de remplacement pour au moins 10 ans après l'achat de votre produit LPA, ce qui en fait :

- un achat éco-responsable. S'il y a un bris, vous savez que les pièces de remplacement seront disponibles pendant longtemps. Pourquoi jeter lorsqu'on peut réparer ?
- un achat économique. Vous êtes en voie de faire des économies substantielles grâce à la durabilité augmentée de votre fauteuil LPA.

De plus, nous sommes fiers d'offrir l'une des garanties les plus compétitives sur le marché.

INFORMATION GÉNÉRALE

Ce document se veut une référence pour l'utilisation et l'entretien de votre fauteuil LPA. Il est primordial que toute personne utilisant le fauteuil l'ait lu dans son intégralité.

Il est de la responsabilité du personnel soignant, incluant la famille ou les proches utilisant ce fauteuil de suivre les directives de ce manuel d'instructions en tout temps et de s'assurer de l'entretien et du bon fonctionnement du fauteuil LPA.

LPA Médical inc. n'accepte aucune responsabilité pour tout bris, incident, blessure, dommage ou accident causé par une erreur d'utilisation, par la négligence d'entretenir le fauteuil et de le maintenir dans un état fonctionnel et sécuritaire, par la modification non-autorisée du fauteuil, par l'omission de suivre les directives de ce manuel d'instructions ou par toute autre utilisation jugée anormale.

Les produits LPA ne sont pas conçus pour être lavés par des machines à pression ou par des laveuses automatiques à fauteuils roulants.

Les produits LPA ne sont pas conçus pour être utilisées à l'extérieur ou être utilisés dans les douches.

DÉFINITIONS

Fauteuil gériatrique

Fauteuil conçu pour répondre aux besoins de confort et de mobilisation des gens âgés qui ont une importante perte d'autonomie.

Fauteuil de positionnement

Fauteuil qui permet par ses nombreux ajustements et accessoires d'assurer une posture adéquate, d'aider à prévenir les escarres et les chutes.

Basculer

Fonction qui permet l'inclinaison siège-dossier de façon globale.

Inclinaison du dossier

Fonction qui modifie l'angle du dossier par rapport au siège.

Élévation de l'appui-jambes

Fonction qui contrôle l'angle de l'appui-jambe par rapport au siège.

Compensation de l'appui-pieds

Fonction d'ajustement de la position de l'appui-pieds en fonction de l'angle de l'appui-jambes.

Patient

Utilisateur final du fauteuil, celui ou celle qui reçoit les soins.

MESURES DE SÉCURITÉ

L'assignation du fauteuil, les ajustements de positionnement et les manœuvres de mobilisation doivent avoir été établies par des professionnels ayant reçu une formation à cet effet.

Les intervenants soignants ou aidants naturels doivent avoir reçu une formation adéquate par un représentant LPA médical ou par un tiers ayant reçu ladite formation avant d'utiliser le fauteuil. Ce manuel d'instructions sera utilisé comme référence pour la formation continue.

Il est fortement recommandé de nommer un soignant responsable de la formation et de maintenir une liste à jour de ceux qui l'ont reçue. Pour la sécurité du patient, toute personne n'ayant pas reçu la formation adéquate ne devrait pas être autorisée à manœuvrer le fauteuil.

APPLICATIONS

Le fauteuil Optimum est dédié aux soins de longue durée et courte durée pour des patients en perte d'autonomie ou en réhabilitation, qui ont besoin d'aide au positionnement et/ou de variation de posture. L'assignation et les ajustements initiaux se doivent d'être faits par des professionnels qualifiés.



Le fauteuil Optimum 1400 n'est pas conçu pour être nettoyé à la machine à pression ou à la machine à laver industrielle. De telles pratiques peuvent entraîner de la rouille au niveau des composantes et rendre nulles les garanties. De plus, les fauteuils LPA ne sont pas conçus pour être utilisés à l'extérieur.



Le fauteuil Optimum 1400 se doit d'être utilisé avec les accessoires conçus et dédiés à celui-ci par LPA Médical inc. Il doit être utilisé en accord avec les pratiques reconnues en matière de soins et de sécurité.

INSPECTION AVANT UTILISATION

Le fauteuil est expédié complètement assemblé. Il doit être inspecté au déballage et tout dommage ou manque de pièce/accessoire doit être signalé à votre fournisseur pour que les corrections soient apportées avant la mise en service.

PRÉVENTIONS DES RISQUES

Toujours appliquer les freins lorsque le fauteuil n'est pas en déplacement et pour toute manœuvre de transfert ou repositionnement. La même règle s'applique pour un fauteuil inutilisé.

Lorsque le patient est installé au fauteuil, il est important pour éviter le glissement que la bascule du siège soit activée vers l'arrière à un angle approprié à chaque cas. Le repose-pieds doit également être bien ajusté sous les pieds pour la même raison.

Pour les cas où le patient est agité, la bascule doit être utilisée selon le cas pour éviter les risques de renversements. De plus, le fauteuil ne doit pas être à portée de garde-corps, de ridelles de lits ou d'objets fixes qui pourraient être agrippés et causer un renversement. Notez que pour ces cas, le patient doit toujours être sous supervision.

Pour éviter les blessures lorsque les fonctions de bascule, d'inclinaison de dossier et d'appui-pieds sont utilisées, assurez-vous que :

- Les freins sont appliqués.
- Les bras du patient soient à l'intérieur des appui-bras.
- Les jambes soient bien au centre de l'appui-jambes.
- Qu'une seule fonction à la fois soit utilisée.
- Qu'il n'y a aucun point de pincement possible.

Ces mesures sont nécessaires tant pour la sécurité du patient que celle de l'intervenant.

L'utilisation de la table à des fins de contention est prohibée et peut entraîner des situations d'étranglement pouvant causer la mort. Seule l'utilisation de contentions homologués et prescrites est acceptée.

USAGES INAPPROPRIÉS

- Manipuler le fauteuil sans formation adéquate.
- Circuler en dehors des zones aménagées.
- Circuler sans utiliser la roue directionnelle.
- Utiliser avec un patient sans assignation par un professionnel.
- Ajustements qui obligent un repositionnement fréquent.
- Laisser un patient dans un endroit non sécurisé ou sans surveillance.
- Utiliser comme chaise de douche.
- Excéder la limite de poids permise.
- Laisser un résident se lever sur la palette d'appui-pieds.
- Déplacer le fauteuil sans désengager les freins.
- Ne pas ajuster la longueur de l'appui-pied en fonction de l'angle de l'appui-jambes.
- Incliner le dossier sans augmenter la bascule.

NETTOYAGE

Le nettoyage doit être fait selon les recommandations des fabricants des recouvrements choisis. Assurez-vous auprès de votre fournisseur que les produits que vous utilisez sont compatibles.

 **Le fauteuil ne doit pas être nettoyé à la pression ou à l'intérieur d'une machine à laver. Ces pratiques entraînent de la rouille interne, ainsi que la dégradation des composantes d'ajustements et annule ainsi la garantie du fauteuil LPA.**

ENTRETIEN

Dans la mesure où les recommandations d'usage et de nettoyage sont respectées, le fauteuil Optimum ne demande pas d'entretien préventif. Certaines pièces seront à remplacer pour usure normale au cours des années d'utilisation.


INSTRUCTIONS D'AJUSTEMENTS ET D'OPÉRATIONS

ROUES

L'Optimum 1400 est muni de 3 roues avec freins à levier d'activation rouges et d'une roue directionnelle à levier d'activation vert.

Pour appliquer les freins


1. Appliquez une pression du bout du pied sur le bas des leviers d'activation rouges des deux roues arrière et sur celui de la roue avant gauche.

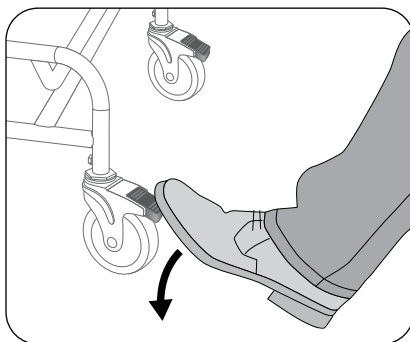

⚠ ATTENTION : AVANT DE FAIRE TOUTE MANIPULATION OU AJUSTEMENT, LES 3 FREINS DOIVENT ÊTRE APPLIQUÉS DÈS QUE LE FAUTEUIL N'EST PAS UTILISÉ POUR CIRCULER AFIN QUE LA STABILITÉ SOIT ASSURÉE.

Pour désengager les freins

1. Appliquez une pression du bout du pied sur le haut du levier d'activation rouge des trois roues.

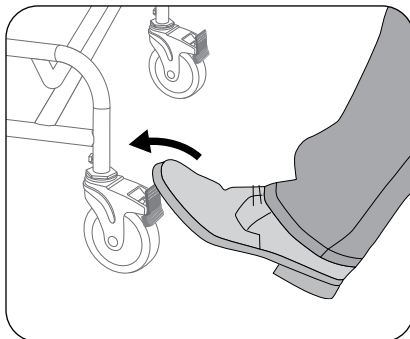


⚠ ATTENTION : NE JAMAIS DÉPLACER LE FAUTEUIL LORSQUE LES FREINS SONT APPLIQUÉS, DES BRIS, DES BLESSURES OU LA MORT POURRAIENT EN RÉSULTER.


Utilisation du levier d'activation de la roue directionnelle

La roue directionnelle est située à l'avant à droite et munie d'un levier d'activation vert.

1. Appliquez une pression du bout du pied sur le bas du levier d'activation vert pour limiter la direction.

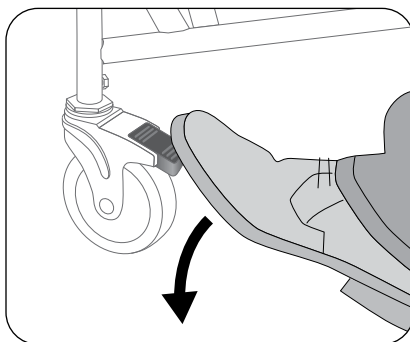


2. Appliquez une pression du bout du pied sur le haut du levier d'activation vert pour libérer la direction.

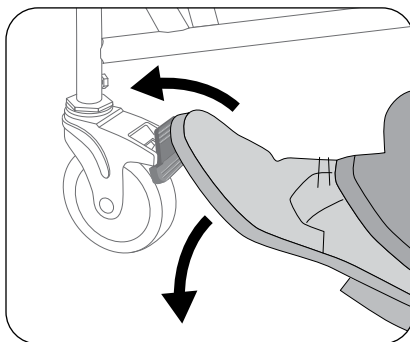

✔ La fonction roue directionnelle permet de déplacer le fauteuil en ligne droite sur de plus longues distances. La position avant de celle-ci permet de manœuvrer le fauteuil avec un risque minimum de blessure pour l'intervenant. Diriger un fauteuil en utilisant les roues arrière pour amorcer les virages demande un peu de pratique mais permet que le poids du patient ait peu d'impact sur l'effort à déployer pour tourner. Gardez à l'esprit que vous devez amorcer le virage seulement lorsque la moitié avant du fauteuil a dépassé l'intersection. De plus, gardez toujours une distance d'au moins 12 pouces (30 cm) des murs en déplacement afin de maintenir la marge de manœuvre nécessaire pour corriger la trajectoire.

PROFONDEUR D'ASSISE


L'ajustement de la profondeur d'assise se doit d'être fait préalablement, en fonction de la mesure morphologique de la personne par un professionnel du positionnement.

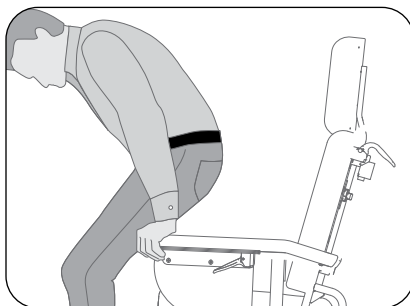


⚠ ATTENTION : AVANT DE FAIRE TOUTE MANIPULATION LES FREINS DOIVENT ÊTRE APPLIQUÉS.

Ajustement de la profondeur d'assise

1. Tirez le levier d'activation situé à l'avant gauche.

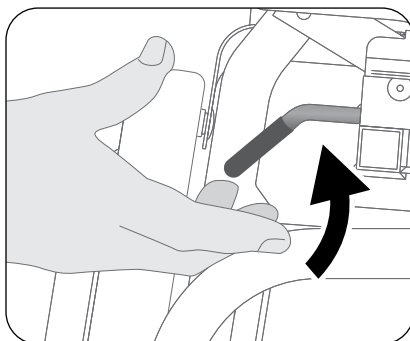

2. Maintenez le levier d'activation vers l'avant et bougez le siège vers l'avant ou l'arrière pour obtenir la profondeur requise.

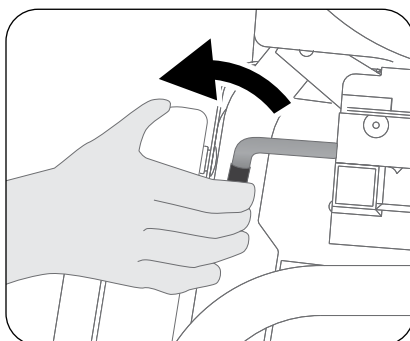

3. Relâchez le levier d'activation.

Cet ajustement devrait rester le même jusqu'à l'assignation à une nouvelle personne.



✓ La profondeur appropriée assure le confort, le bon positionnement et prévient le glissement du patient.

Le siège bascule globalement avec le dossier et les appui-bras.

Un vérin au gaz sous le siège est relié à trois leviers d'activation. L'un des leviers est situé à l'extrême gauche sur la barre de poussée et un sous chacun des appui-bras. Ceux-ci permettent d'activer la bascule de 0 à 30 degrés par des positions stratégiques ayant pour but le contact visuel avec le patient et la prévention des blessures aux intervenants.

VARIATION : Bascule par l'arrière


1. Expliquez au patient la manœuvre avant de la faire.
2. Prendre appui sur la barre de poussée avec la main droite.
3. Avec la main gauche, activez le levier d'activation à l'extrême gauche et avec les deux mains exercez la pression nécessaire vers le bas pour amorcer la bascule.
4. Agissez en douceur tout en gardant les deux mains sur la barre de poussée aussi longtemps que levier d'activation est pressé.

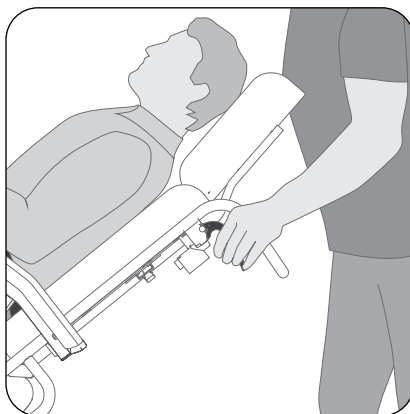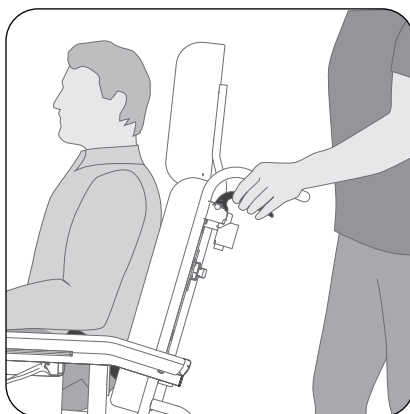


i Si la manœuvre demande trop d'efforts, inclinez d'abord le dossier pour répartir le poids du patient de chaque côté du point de bascule. Référez-vous à la page 16 pour la procédure. Vous pourrez redresser le dossier lorsque l'angle de bascule souhaité sera atteint.

VARIATION : Bascule par le côté


1. Placez-vous sur le côté gauche du fauteuil à la hauteur du patient.

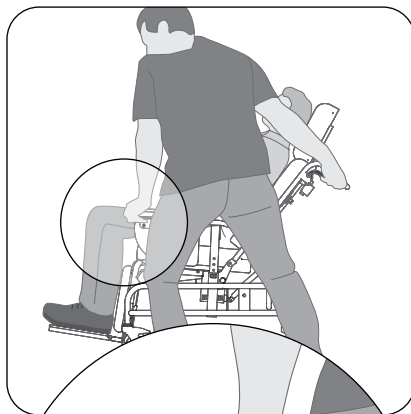

2. Agrippez avec votre main gauche l'avant de l'appui-bras.

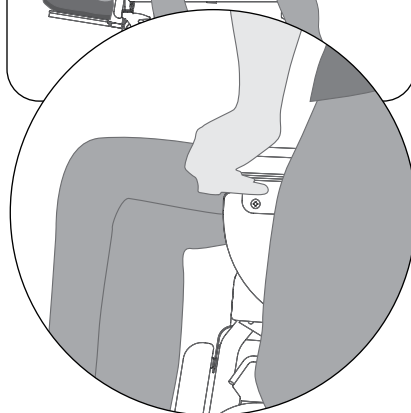

3. Avec votre main droite, activez le levier d'activation de l'extrême gauche de la barre de poussée. Vous pouvez ainsi en utilisant la force de vos jambes exercer une bascule de 0 à 30 degrés.

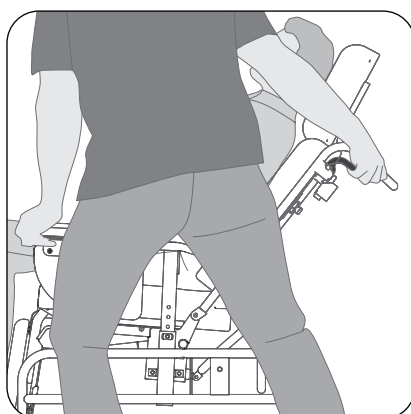


-  La bascule a pour but de changer ponctuellement la position de la personne, afin de faire varier les points de pression pour prévenir les rougeurs et les escarres.

APPUI-JAMBES ÉLÉVATEUR


L'appui-jambes élévateur offre une variation d'angle de 80 à 132 degrés. Il est muni d'un appui-mollets coussiné et d'une palette pleine largeur ajustable pour les pieds.

Utilisation et ajustement de l'appui- jambes


1. Soulevez légèrement les jambes du patient.

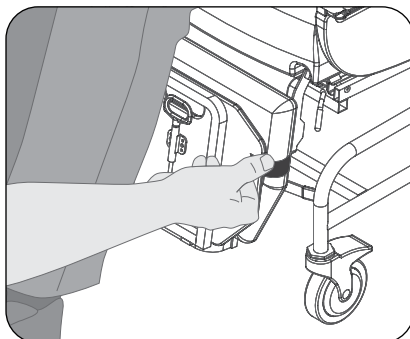

2. Détachez la sangle de retenue de la palette et rabaissez celle-ci.

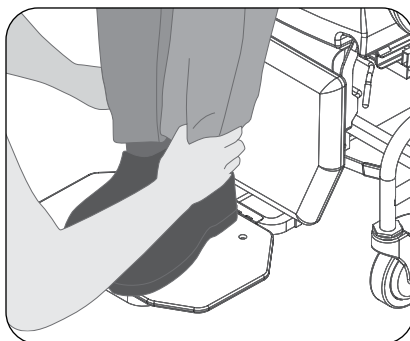

3. Posez les pieds sur la palette.

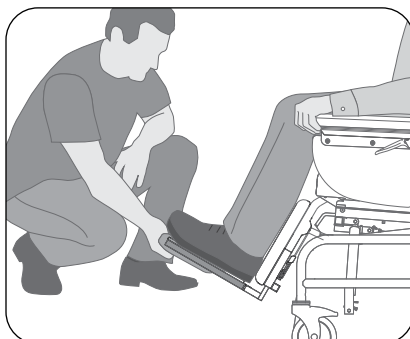


4. Tirez la poignée d'activation en forme de D au centre, pour ajuster à l'angle désiré.



Un vérin au gaz sous l'appui-jambes commande cette fonction.

Compensation de la longueur en fonction de l'angle

1. Utilisez le levier d'activation à crémaillère situé sur le côté gauche de l'appui-mollets pour allonger l'appui-jambe par déplacement de la palette d'appui-pieds.

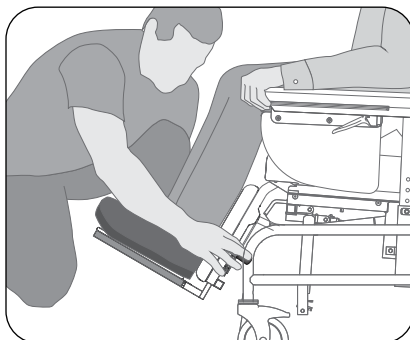


- i** Notez que l'allongement doit être proportionnel à l'angle choisi. Une juste compensation maintient les cuisses sur l'assise et les pieds bien à plat sur l'appui-pieds. Trop de compensation peut causer un glissement de la personne et compromettre le bon positionnement.
- ✓** Lorsque l'on élève l'appui-jambes, il est normal que les genoux de l'occupant s'élèvent. Il est important pour son confort et pour éviter une pression au niveau des ischions que les cuisses demeurent en contact avec le siège.

Rangement de l'appui-jambes pour transfert debout


1. Tirez la poignée d'activation en D.

2. Poussez l'appui-jambes en utilisant la palette ouverte comme bras de levier.

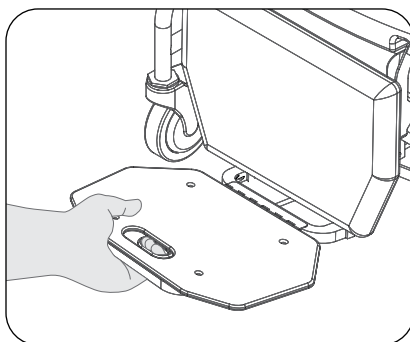

3. Poussez au maximum sous le siège pour assurer un dégagement suffisant afin que la mise en charge du patient soit la plus efficace possible.


4. Soulevez légèrement les jambes de la personne afin de pouvoir replier la palette et l'attacher à la sangle de retenue.

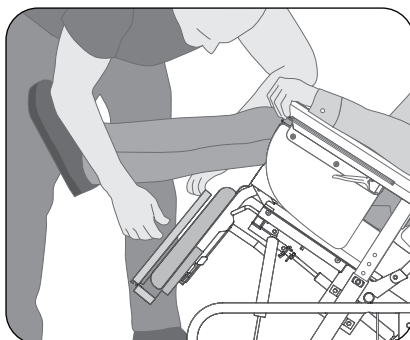

5. Remontez l'appui-pied sous le coussin de l'appui-mollet.

6. Rattachez la sangle.

7. Déposez les pieds au sol et procédez au transfert selon les instructions propres pour ce patient.

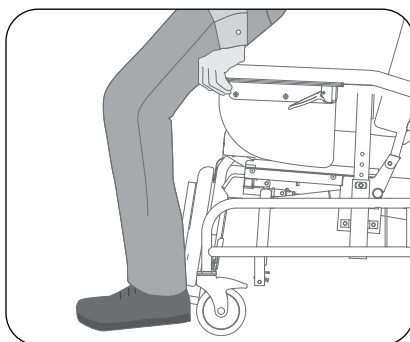



L'inclinaison de dossier permet de bonifier le confort du fauteuil Optimum pour les périodes de repos. Elle offre un ajustement de 102 à 145 degrés par rapport au siège et la possibilité d'être à 175 degrés par rapport au sol si la bascule est à son maximum.

i Il est important de basculer le fauteuil avant d'incliner le dossier pour prévenir le glissement du patient.

i Un vérin au gaz sous le siège est relié au levier d'activation situé à l'arrière au centre de la barre de poussée. Il est équipé d'une bague positionnable sur la tige du vérin, permettant d'annuler ou de limiter l'angle d'inclinaison du dossier selon les directives du professionnel prescripteur.




Inclinaison du dossier

1. Expliquez la manœuvre à la personne.
2. S'assurer qu'il y a une bascule de l'assise suffisante afin d'éviter le glissement du patient.
3. Agrippez bien la barre de poussée avant de presser le levier d'activation centrale. Cette façon de faire permet d'éviter un mouvement brusque qui peut surprendre l'occupant.
4. Appuyez sur le levier d'activation en retenant le dossier.
5. Inclinez le dossier selon l'angle désiré.
6. Relâchez le levier, lorsque l'angle désiré est atteint.

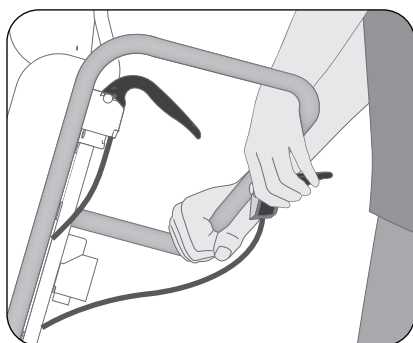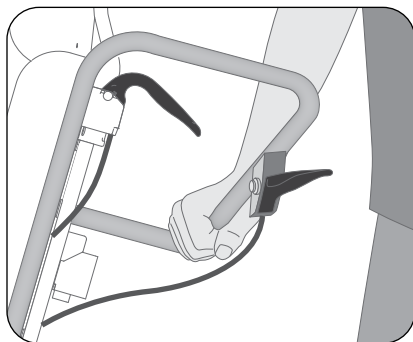

Redressement du dossier

1. Placez-vous d'un côté ou de l'autre du fauteuil.
2. Réduisez d'abord la bascule du siège à environ 5 à 7 degrés par rapport au sol (particulièrement si l'inclinaison du dossier est au maximum ou si le patient est lourd).
3. Si vous êtes à gauche du fauteuil, pressez le levier d'activation sous l'appui-bras avec votre main droite pendant que vous faites basculer le fauteuil vers l'avant en exerçant une pression sur l'appui-jambes du fauteuil avec votre main gauche.
4. Retournez vous placer derrière le fauteuil.
5. Agrippez bien la barre de poussée avec la main droite avant de presser le levier d'activation centrale avec la main gauche.
6. Ramenez le dossier en douceur afin d'éviter les mouvements brusques.

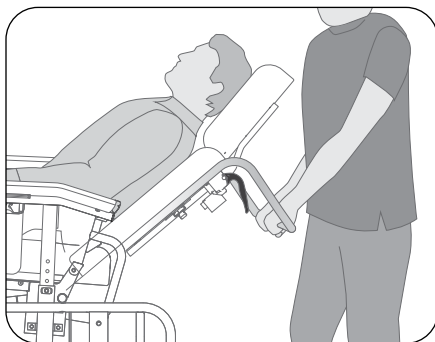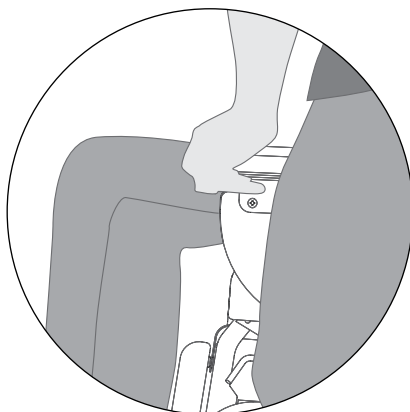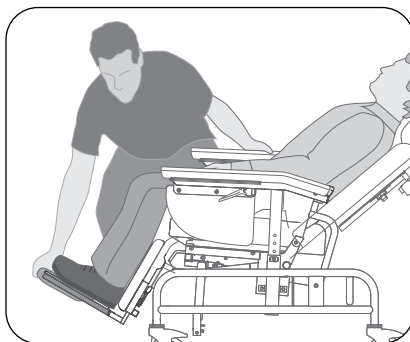


Pensez à plier vos genoux pour forcer, au lieu de plier votre dos.

APPUIS-BRAS AJUSTABLES ET ESCAMOTABLES


Les appui-bras sont ajustables en hauteur de 3 1/2" (9 cm) à 8 1/2" (21,5 cm) à partir du siège par incrémentation de 1" (2,5 cm). Ils peuvent aussi être descendus au niveau du siège pour faciliter les transferts et l'accès au patient.

Ajustement en hauteur et dégagement complet

1. Sur le support d'appui-bras, débloquez la tirette à ressort en dévissant d'environ 2 tours le bouton noir de la tirette, tout en maintenant l'appui-bras avec l'autre main.

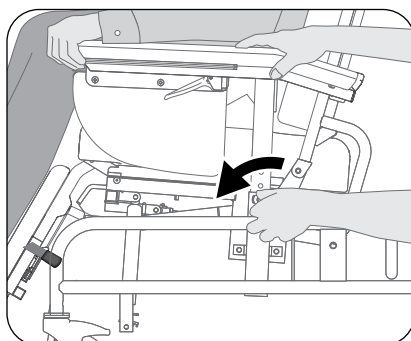


2. Tirez le bouton noir pour dégager la tirette de l'appui-bras ajustable.

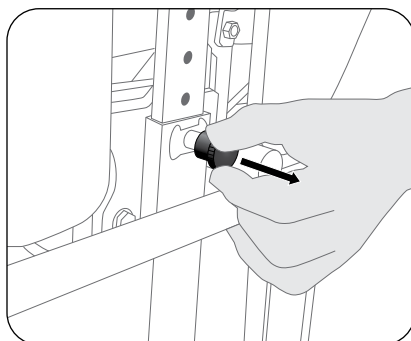

3. Ajustez l'appui-bras à la hauteur désirée.

4. Relâchez le bouton, en vous assurant que la tirette est bien indexée dans un trou de l'appui-bras.

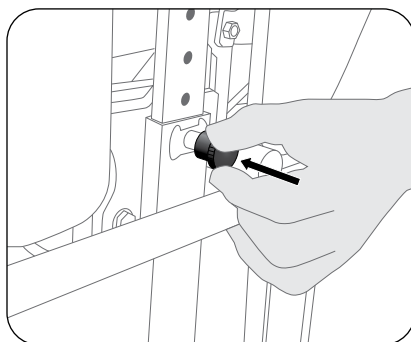

5. Revissez le bouton pour serrer et stabiliser l'appui-bras.

i Pour dégager complètement le siège, laissez descendre l'appui-bras au plus bas jusqu'à ce qu'il rejoigne la partie supérieure de son support.



APPUI-TÊTE PROFILÉ ARTICULÉ

L'appui-tête profilé articulé optionnel de l'Optimum 1400 permet un positionnement précis de la tête. Ses nombreuses possibilités d'ajustements permettent de répondre à la majorité des besoins en positionnement. Il est facilement amovible pour les manœuvres de transfert au levier.

⚠ IMPORTANT : TOUJOURS RETIRER L'APPUI-TÊTE LORS DE L'UTILISATION DE LEVIERS AVEC TOILES. L'OMISSION DE LE FAIRE PEUT ENTRAINER DES BRIS, DES BLESSURES OU LA MORT.

Installation de l'appui-tête

1. À l'arrière du dossier, desserrez le bouton cannelé du support d'accueil.
2. Retirez la partie supérieure du dossier en la prenant par les côtés.
3. Glissez la tige carrée de l'appui-tête profilé dans le support d'accueil.
4. Desserrez la bague mémoire sur la tige et resserrez le bouton cannelé du support d'accueil pour bloquer l'appui-tête à la hauteur appropriée.
5. Resserrez la bague mémoire sur la tige pour préserver l'ajustement.

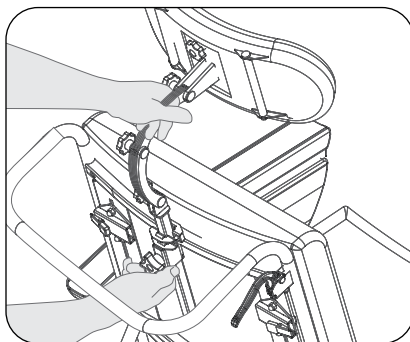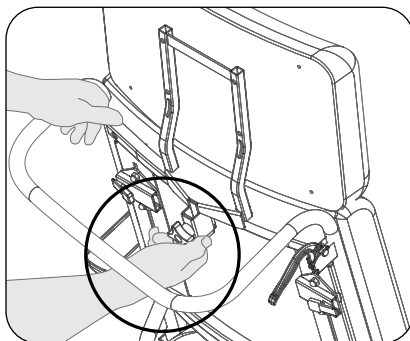



- i** Les trois boutons cannelés qui se trouvent sur les plaques qui relient l'appui-tête au fauteuil permettent de procéder à son ajustement.
- i** Le repose-tête coussiné est monté sur trois plaques articulées qui permettent d'en modifier le profil et la position. Les deux plaques extérieures sont reliées à celle du centre de façon mobile. Celles-ci sont ajustées en usine pour offrir une résistance adéquate aux ajustements, mais peuvent être resserrées ou desserrées au besoin.
- i** Un quatrième bouton cannelé derrière le repose-tête offre la possibilité de le déplacer latéralement.

AILETTES LATÉRALES AJUSTABLES

Les ailettes latérales ajustables optionnelles sont ajustables en hauteur et en largeur.


Installation des ailettes

1. Insérez la barre plate de l'ailette dans la bride d'insertion derrière la section supérieure de dossier, en orientant la partie longue et étroite de l'ailette vers le bas.
2. Poussez jusqu'à ce que le levier de retenue se referme sur le loquet de la tige.
3. Procédez de la même façon avec l'autre ailette. Assurez-vous que les deux leviers retiennent efficacement les ailettes.
4. Les ailettes latérales ont été conçues pour encadrer la partie supérieure du corps.

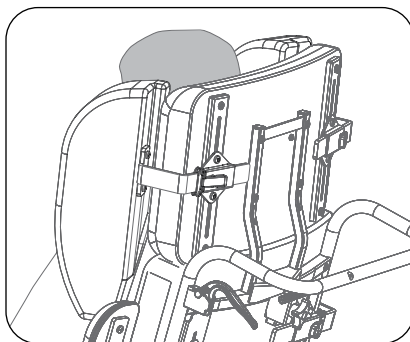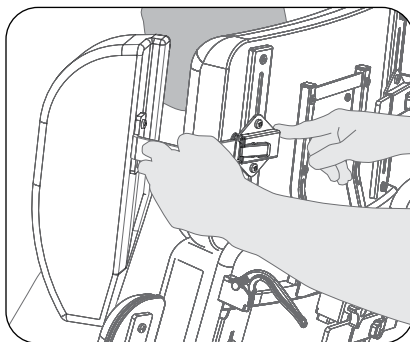


Ajustement de la hauteur

1. Desserrez sans les retirer les deux écrous des brides d'insertion afin de pouvoir les déplacer dans les glissières de la section supérieure de dossier.
2. Déterminez la hauteur appropriée.
3. Resserrez les écrous.

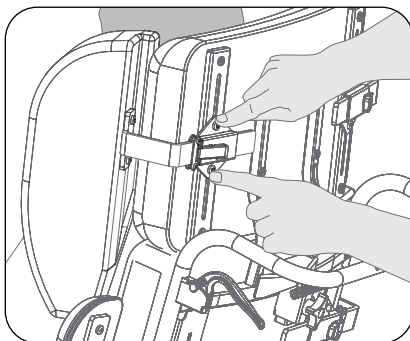

Ajustement de la largeur

1. Desserrez sans les retirer les deux vis du loquet de la barre plate lorsque l'aillette est en place jusqu'à ce qu'il soit possible de déplacer l'aillette latéralement.
2. Déterminez la largeur appropriée.
3. Resserrez les vis.

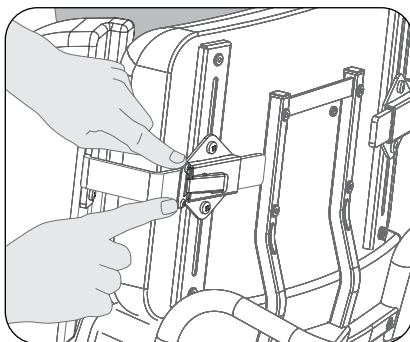


SUPPORTS THORACIQUES STRUCTURAUX AJUSTABLES

Les supports thoraciques optionnels sont fixés à la structure du dossier et offrent un appui au thorax au moyen de coussinets montés sur pivot.


Ajustement de la hauteur

1. Desserrez sans les retirer les deux écrous des brides d'insertion afin de pouvoir les déplacer dans les glissières de la section supérieure de dossier.
2. Déterminez la hauteur appropriée.
3. Resserrez les écrous.

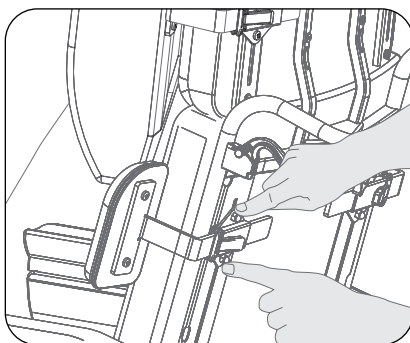

Ajustement de la largeur

1. Desserrez sans les retirer les deux vis du loquet de la barre plate lorsque l'ailette est en place jusqu'à ce qu'il soit possible de déplacer l'ailette latéralement.
2. Déterminez la largeur appropriée.
3. Resserrez les vis.

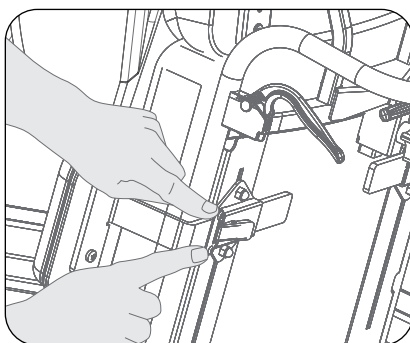

✓ Les supports thoraciques demeurent flottants pour éviter les points de pression.

⚠ **ATTENTION : L'AJUSTEMENT DES SUPPORTS THORACIQUES SE DOIT D'ÊTRE FAIT PAR UN PROFESSIONNEL DU POSITIONNEMENT. UN AJUSTEMENT INADÉQUAT POURRAIT ENTRAINER DES BLESSURES À L'USAGER.**

TERMES & CONDITIONS

APPLICABLE POUR LES PRODUITS ACHETÉS À PARTIR DU 1^{er} SEPTEMBRE 2018

GÉNÉRAL

LPA FAUTEUILS MÉDICALISÉS se réserve le droit de modifier sans avis ou obligation la conception, les spécifications et les prix des équipements qu'elle manufacture. Le transport est chargé au prix en vigueur au moment de l'expédition.

Le montant minimal de commande est de 25 \$.

TRANSPORT

Toute marchandise endommagée par le transport devra faire l'objet d'une déclaration immédiate à la livraison, suivie d'une réclamation écrite dans les cinq (5) jours suivants. Une copie de la réclamation devra être envoyée à LPA. Tout dommage non-déclaré durant cette période annulera la garantie LPA FAUTEUILS MÉDICALISÉS.

Des frais additionnels de manutention et/ou d'utilisation de plate-forme élévatrice lors du déchargement peuvent s'appliquer et sont à l'entière charge du client.

RETOUR DE MARCHANDISE

Aucun retour de marchandise ne sera accepté sans autorisation écrite de notre service à la clientèle. Toute réclamation devra inclure les informations suivantes :

- Les raisons du retour.
- Le numéro de la facture ou du bon de livraison.
- Le numéro du modèle ou de la pièce.
- La quantité de marchandise retournée.

Le retour de marchandise non autorisé ne sera en aucun temps accepté. Tous les retours autorisés devront être envoyés port payé, sauf s'il y a eu erreur dans la commande ou si les items envoyés sont défectueux. Dans ce cas, communiquez avec LPA FAUTEUILS MÉDICALISÉS pour des instructions spéciales.

GARANTIE GÉNÉRALE

La garantie LPA FAUTEUILS MÉDICALISÉS couvre les défauts de fabrication, pour le propriétaire/utilisateur original, sauf les exclusions mentionnées plus bas, pour les périodes ci-dessous à partir de la date d'achat :

À vie utile* pour la structure métallique des fauteuils.

5 ans sur les structures de bois des fauteuils berçants autobloquants Thera-Glide® modèles W et T.

3 ans pour le mécanisme de dossier des fauteuils berçants autobloquants Thera-Glide®.

3 ans sur le rembourrage des fauteuils.

2 ans pour tous les autres mécanismes, les vérins de blocage au gaz ou mécanique, les câbles de contrôle, les roues, les tablettes.

1 an sur tous les accessoires achetés séparément des fauteuils et pièces de remplacement.

Si une pièce fait défaut, contacter notre service à la clientèle avec les informations suivantes :

1. Modèle, n° de série et n° de pièce.
2. Date d'achat et numéro de facture.
3. Description du problème.

* La durée de vie utile d'un fauteuil LPA est évaluée à 10 ans.

ENGAGEMENT

LPA FAUTEUILS MÉDICALISÉS s'engage à fournir des pièces de remplacement pour une période de 10 ans après la date d'achat du produit. LPA FAUTEUILS MÉDICALISÉS se réserve le droit de fournir des pièces de remplacement au design différent que celui de la pièce remplacée, à sa seule discrétion.

L'obligation de LPA FAUTEUILS MÉDICALISÉS se limite expressément à corriger le défaut par l'ajustement, réparation ou remplacement de l'équipement, à la seule discrétion de LPA.

EXCLUSION

- Usure normale.
- Dommages dus à l'eau ou au feu, incluant les dommages causés par les laveuses à pression et laveuses de fauteuils roulants automatiques.
- Rouille du métal et recouvrement abîmé.
- Réparation ou modification non autorisée ou faite avec d'autres pièces que celles d'origine.
- Dommages dus à un usage anormal ou abusif.
- Dommages causés par une exposition aux intempéries.

LISTE DES PIÈCES

N°	Code	Description
1	1B3600	Appui-thoracique, avec quincaillerie
2	B2-17-DR	Coussinage d'aillette, droite
3	B2-17-GA	Coussinage d'aillette, gauche
4	1B4100	Support d'aillette
5	OP-0810	Réceptacles d'ajustement, avec quincaillerie
6	AB-07	Appui-cervical à bretelle Optimum 1400, noir
7	B2-14	Coussinage d'appui-tête ajustable
8	1B2900	Support pour appui-tête ajustable, avec quincaillerie
9	SU-05	Appui-bras polyuréthane noir
10	CU-07-R	Coussin d'appui-coude, droit
11	CU-07-L	Coussin d'appui-coude, gauche
12	XRE71097-02	Planche d'appui-coude
13	1B3505	Support d'appui-coude, avec quincaillerie
14	B2-03-18	Coussin haut de dossier amovible Optimum 1400 – 18", avec quincaillerie
15	B2-03-20	Coussin haut de dossier amovible Optimum 1400 – 20", avec quincaillerie
16	B2-03-22	Coussin haut de dossier amovible Optimum 1400 – 22" et 24", avec quincaillerie
17	1B2800	Support pour coussin haut de dossier amovible
18	XPE65052R	Embout de glissière pour table, droite
19	XPE65052L	Embout de glissière pour table, gauche
20	PV7850102R	Glissière pour table, droit
21	PV7850102L	Glissière pour table, gauche
22	1C2500-DR	Support d'appui-bras, droit, avec quincaillerie
23	1C2500-GA	Support d'appui-bras, gauche, avec quincaillerie
24	B2-02-18	Coussin de dossier Optimum 1400 – 18", avec quincaillerie
25	B2-02-20	Coussin de dossier Optimum 1400 – 20", avec quincaillerie
26	B2-02-22	Coussin de dossier Optimum 1400 – 22" et 24", avec quincaillerie
27	1B2418	Structure de dossier Optimum 1400 – 18", avec quincaillerie
28	1B2420	Structure de dossier Optimum 1400 – 20", 22" et 24", avec quincaillerie
29	C2-80D	Panneau latéral Optimum 1400 – droit, avec quincaillerie
30	C2-80G	Panneau latéral Optimum 1400 – gauche, avec quincaillerie
31	QCL50002	Poignée droite et câble court, avec quincaillerie
32	1A1400A	Pivot de base, avec quincaillerie
33	A2-01-18	Coussin de siège courbe Optimum 1400 – 18"
34	A2-01-20	Coussin de siège courbe Optimum 1400 – 20"
35	A2-01-22	Coussin de siège courbe Optimum 1400 – 22", 24"
36	QCL50003	Poignée courbe et câble long, avec quincaillerie

N°	Code	Description
37	QCL50001	Poignée droite et câble long, avec quincaillerie
38	1C1300	Support d'appui-bras, avec quincaillerie
39	1A2418	Support basculant de l'assise Optimum 1400 – 18"
40	1A2420	Support basculant de l'assise Optimum 1400 – 20"
41	1A2422	Support basculant de l'assise Optimum 1400 – 22" et 24"
42	1A1118	Assem. Assise tiroir courbe Optimum 1400 – 18"
43	1A1120	Assem. Assise tiroir courbe Optimum 1400 – 20"
44	1A1122	Assem. Assise tiroir courbe Optimum 1400 – 22", 24"
45	1E2418	Assem. Base assise Optimum 1400 – 18"
46	1E2420	Assem. Base assise Optimum 1400 – 20"
47	1E2422	Assem. Base assise Optimum 1400 – 22" et 24"
48	1A1600	Loquet de siège Optimum 1400
49	D1-24	Levier & câble activation appui-pied
50	D1-27-N	Plaque d'appui-pied Optimum 1400 – 18" et 20", avec quincaillerie
51	D1-25-N	Plaque d'appui-pied Optimum 1400 – 22" et 24", avec quincaillerie
52	D2-01-18	Coussinage d'appui-mollet – 18"
53	D2-01-20	Coussinage d'appui-mollet – 20", 22" et 24"
54	1D1400	Assemblage d'app-mollet rég. et repose-pied Optimum 1400
55	1D2418	Appui-jambe /mollet Optimum 1400 – 18"
56	1D2420	Appui-jambe /mollet Optimum 1400 – 20", 22" et 24"
57	1D1117	Poignée d'appui-mollet Optimum 1400 – 18"
58	1D1120	Poignée d'appui-mollet Optimum 1400 – 20"
59	QWE05017	Roue 5" – barrure total
60	QWE05018	Roue 5" – barrure directionnelle
61	A1-27	Vérin au gaz de bascule
62	B1-231	Vérin au gaz d'inclinaison
63	ACP-03-17	Tablette thermoformée Optimum 1400 – 18"
64	ACP-03-20	Tablette thermoformée Optimum 1400 – 20"
65	ACP-03-24	Tablette thermoformée Optimum 1400 – 24"
66	1B4018	Support de table 18"
67	1B4020	Support de table 20"
68	1E1800	Fixation pour tige à soluté pour Optimum 1400
69	1E1600	Extension de tige à soluté pour Optimum 1400
70	1E1601	Section de tige à soluté pour Optimum 1400
71	D1-23	Vérin au gaz d'appui jambe
72	1B2426	Renfort de dossier Optimum 1400 – 22" et 24"

VUE ÉCLATÉE
EXPLODED VIEW

