

fauteuil de repos
Harmonie
Série C

LA SOMME DES DÉTAILS FAIT LA DIFFÉRENCE



FAUTEUILS
MÉDICALISÉS



MANUEL D'INSTRUCTION

lpamedical.com

2527, avenue Dalton, Québec (Qc) G1P 3S6
T 418 681-1313 1 800 663-4863 F 418 681-4488

MOT DE REMERCIEMENT

Félicitations et merci pour l'achat de votre fauteuil médicalisé LPA Médical.

Depuis 1989, LPA Médical se dévoue à la conception et à la fabrication de fauteuils adaptés aux demandes et exigences les plus rigoureuses du milieu de la santé. Nos produits sont conçus avec le confort et la durabilité à l'esprit, autant dans les unités de soins de longue que de courte durée. Nous sommes fiers de fabriquer des produits de qualité qui intègrent des fonctionnalités avancées dans un design esthétique qui respecte la dignité de l'utilisateur.

Lisez attentivement ce manuel d'instructions et consultez-le souvent afin de maximiser les bénéfices que votre fauteuil LPA vous apportera. Suite à cette lecture, si vous avez des questions n'hésitez pas à contacter votre représentant LPA, à nous contacter directement via notre site web ou via notre ligne téléphonique listée ci-bas.

Nous espérons que vous apprécierez votre fauteuil LPA Médical et nous vous remercions pour votre confiance.

Bryan Welch
Président

LPA Médical inc.
2527, avenue Dalton,
Québec, QC, Canada G1P 3S6

T: 418 681 1313
F: 418 681 4488
Sans frais: 1 800 663-4863

info@lpamedical.com
www.lpamedical.com

TABLE DES MATIÈRES

Mot de remerciement.....	2
Politique de disponibilité des pièces de remplacement.....	4
Information générale.....	4
Définitions.....	4
Mesures de sécurité.....	5
Applications.....	5
Inspection avant utilisation.....	6
Préventions des risques.....	6
Usages inappropriés.....	7
Nettoyage.....	7
Entretien.....	7
Fonctions d'utilisation.....	8
Ajustements possibles.....	8
Instructions d'ajustements et d'opérations.....	9
Roues.....	9
Hauteur siège/sol.....	11
Profondeur d'assise.....	12
Angle de dossier.....	13
inclinaison du dossier et élévation de l'appui-jambe.....	14
Activation par l'utilisateur.....	14
Fermeture par l'utilisateur.....	15
Activation avec l'aide d'un intervenant.....	16
Fermeture avec l'aide d'un intervenant.....	17
Emplacement du numéro de série.....	18
Options et accessoires disponibles.....	19
Recommandations ergonomiques complémentaires.....	20
Se relever.....	20
S'asseoir.....	20
Termes & conditions.....	21
Général.....	21
Transport.....	21
Retour de marchandise.....	21
Garantie générale.....	22
Engagement.....	22
Exclusion.....	22
Liste des pièces.....	23
Vue éclatée.....	24

POLITIQUE DE DISPONIBILITÉ DES PIÈCES DE REMPLACEMENT

LPA Médical a une politique de disponibilité de pièces de remplacement pour au moins 10 ans après l'achat de votre produit LPA, ce qui en fait :

- un achat éco-responsable. S'il y a un bris, vous savez que les pièces de remplacement seront disponibles pendant longtemps. Pourquoi jeter lorsqu'on peut réparer ?
- un achat économique. Vous êtes en voie de faire des économies substantielles grâce à la durabilité augmentée de votre fauteuil LPA.

De plus, nous sommes fiers d'offrir l'une des garanties les plus compétitives sur le marché.

INFORMATION GÉNÉRALE

Ce document se veut une référence pour l'utilisation et l'entretien de votre fauteuil LPA. Il est primordial que toute personne utilisant le fauteuil l'ait lu dans son intégralité.

Il est de la responsabilité du personnel soignant, incluant la famille ou les proches utilisant ce fauteuil de suivre les directives de ce manuel d'instructions en tout temps et de s'assurer de l'entretien et du bon fonctionnement du fauteuil LPA.

LPA Médical inc. n'accepte aucune responsabilité pour tout bris, incident, blessure, dommage ou accident causé par une erreur d'utilisation, par la négligence d'entretenir le fauteuil et de le maintenir dans un état fonctionnel et sécuritaire, par la modification non-autorisée du fauteuil, par l'omission de suivre les directives de ce manuel d'instructions ou par toute autre utilisation jugée anormale.

Les produits LPA ne sont pas conçus pour être lavés par des machines à pression ou par des laveuses automatiques à fauteuils roulants.

Les produits LPA ne sont pas conçus pour être utilisées à l'extérieur ou être utilisés dans les douches.

DÉFINITIONS

Ajustements (hauteur, profondeur, angle de dossier)

Fonctions qui permettent d'adapter le fauteuil aux différentes morphologies.

Patient ou usager

Utilisateur final du fauteuil, celui ou celle qui reçoit les soins.

MESURES DE SÉCURITÉ

L'assignation du fauteuil Harmonie, ses ajustements de positionnement et les manœuvres de mobilisation doivent avoir été établies par des professionnels ayant reçu une formation à cet effet. Les intervenants soignants ou aidants naturels doivent avoir reçu une formation adéquate par un représentant LPA médical ou par un tiers ayant reçu ladite formation avant d'utiliser le fauteuil. Ce manuel d'instructions sera utilisé comme référence pour la formation continue. Il est fortement recommandé de nommer un soignant responsable de la formation et de maintenir une liste à jour de ceux qui l'ont reçue. Pour la sécurité du patient, toute personne n'ayant pas reçu la formation adéquate ne devrait pas être autorisée à manœuvrer le fauteuil.

APPLICATIONS

Le fauteuil Harmonie est dédié à la clientèle en soins de courte durée des différentes unités des centres hospitaliers, il permet d'effectuer facilement des prélèvements et des traitements spécifiques. La fonction de déploiement de l'inclinaison du dossier simultanément avec l'élévation de l'appui-jambes répond à ce que l'utilisateur connaît des fauteuils domestiques offrant une position allongée de confort et de repos. La conception de ce fauteuil permet de faire des périodes en position assise et en position allongée pour la clientèle en soins de longue durée, en soins palliatifs et à domicile.



Le fauteuil Harmonie n'est pas conçu pour être nettoyé à la machine à pression ou à la machine à laver industrielle. De telles pratiques peuvent entraîner de la rouille au niveau des composantes et rendre nulles les garanties. De plus, les fauteuils LPA ne sont pas conçus pour être utilisés à l'extérieur.



Le fauteuil Harmonie se doit d'être utilisé avec les accessoires conçus et dédiés à celui-ci par LPA Médical inc. Il doit être utilisé en accord avec les pratiques reconnues en matière de soins et de sécurité.

INSPECTION AVANT UTILISATION

Le fauteuil est expédié complètement assemblé. Il doit être inspecté au déballage et tout dommage ou manque de pièce/accessoire doit être signalé à votre fournisseur pour que les corrections soient apportées avant la mise en service.

PRÉVENTION DES RISQUES

Il est important de toujours appliquer les freins lorsque le fauteuil n'est pas en déplacement et lors des manœuvres de transfert au fauteuil. Lorsque le fauteuil est inutilisé, toujours le laisser en position fermée avec les freins appliqués.

Les ajustements morphologiques doivent être faits adéquatement par une personne qualifiée ou supervisée par celle-ci. Pour les cas où le patient est agité, le comportement au fauteuil doit être observé pour en évaluer les risques. De plus, le fauteuil ne doit pas être à portée de garde-corps, de ridelles de lits ou d'objets fixes qui pourraient être agrippés et causer un renversement ou pour éviter un point de pincement possible. Notez que pour ces cas, le patient doit toujours être sous assistance et supervision. Ces mesures sont nécessaires pour la sécurité du patient. L'utilisation de la table à des fins de contention est prohibée et peut entraîner des situations d'étranglement pouvant causer la mort.

NOTE IMPORTANTE : La conception du fauteuil Harmonie ne permet pas l'utilisation d'aucun modèle de ceinture de maintien, de positionnement et de contention. L'utilisation d'une ceinture dans ce fauteuil pourrait entraîner des situations d'étranglement pouvant causer la mort.

USAGES INAPPROPRIÉS

- Manipuler le fauteuil sans formation adéquate.
- Déplacement du fauteuil sans utiliser la roue directionnelle.
- Utiliser avec un patient sans assignation par un professionnel.
- Effectuer des ajustements sans supervision ou formation préalable.
- Laisser un patient à risque dans un endroit non sécurisé ou sans surveillance.
- S'asseoir sur l'appui- jambes lorsque l'utilisateur est au fauteuil.
- Exercer des manœuvres de réanimation.
- Excéder la limite de poids permise.

NETTOYAGE

Le nettoyage doit être fait selon les recommandations des fabricants des revêtements choisis. Assurez-vous auprès de votre fournisseur que les produits que vous utilisez sont compatibles.

 **Le fauteuil ne doit pas être nettoyé à la pression ou à l'intérieur d'une machine à laver. Ces pratiques entraînent de la rouille interne, ainsi que la dégradation des composants d'ajustements et annule ainsi la garantie du fauteuil LPA.**

ENTRETIEN


Pour assurer une utilisation maximale du fauteuil, il est nécessaire qu'il soit tenu propre et les pièces ajustées adéquatement. Les surfaces de revêtement de vinyle doivent être nettoyées avec les produits recommandés par le fabricant. Les pièces métalliques externes du fauteuil doivent être nettoyées au besoin, en utilisant la même solution que pour les revêtements.

Dans la mesure où les recommandations d'usage et de nettoyage sont respectées, le fauteuil Harmonie ne demande pas d'entretien préventif. Certaines pièces seront à remplacer pour usure normale au cours des années d'utilisation.

FONCTIONS D'UTILISATION


Les principales composantes pour une utilisation sécuritaire du fauteuil sont :

- A. Roues avec frein.
- B. Roue directionnelle.
- C. Ajustement de profondeur d'assise et d'angle de dossier.
- D. Barre de conduite.
- E. Ajustement avant de la hauteur d'assise.
- F. Ajustement arrière de la hauteur d'assise.
- G. Coussin d'assise et d'appui-jambes en une pièce.
- H. Appui-bras large.

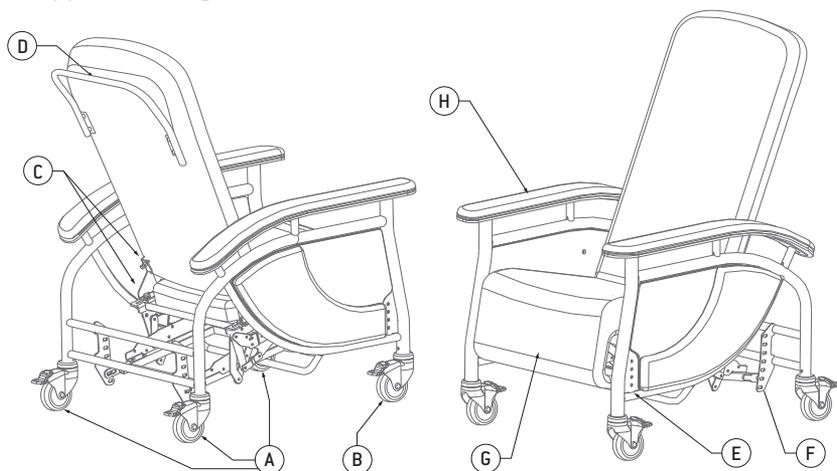

AJUSTEMENTS POSSIBLES

1. La hauteur siège/sol est ajustable de $17 \frac{1}{2}$ à $20 \frac{1}{2}$ po [44 à 52 cm] avec incrémentation de 1 po.
2. L'angle initial de l'assise avec le sol est ajustable. Selon la hauteur d'assise elle passe de 0 à 19 degrés.
3. La profondeur du siège est ajustable de 17 à $18 \frac{1}{2}$ po [43 à 47 mm].
4. L'angle de départ siège/dossier est ajustable de 5 à 18 degrés.

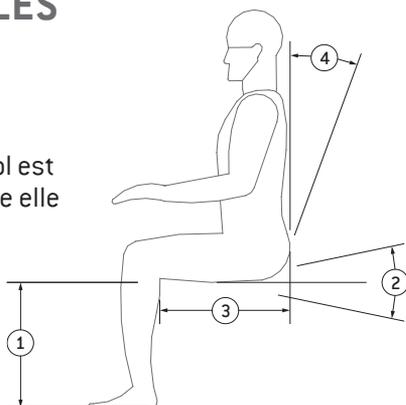


INSTRUCTIONS D'AJUSTEMENTS ET D'OPÉRATIONS

ROUES

Le fauteuil Harmonie est muni de 3 roues avec freins à levier d'activation rouges et d'une roue directionnelle à levier d'activation vert.

Pour appliquer les freins


1. Appliquez une pression du bout du pied sur le bas des leviers d'activation rouges des deux roues arrière et sur celui de la roue avant gauche.

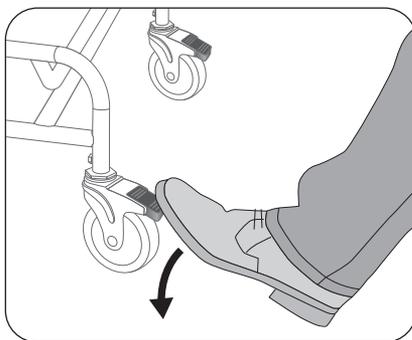

ATTENTION : AVANT DE FAIRE TOUTE MANIPULATION OU AJUSTEMENT, LES 3 FREINS DOIVENT ÊTRE APPLIQUÉS DÈS QUE LE FAUTEUIL N'EST PAS UTILISÉ POUR CIRCULER AFIN QUE LA STABILITÉ SOIT ASSURÉE.

Pour désengager les freins

1. Appliquez une pression du bout du pied sur le haut du levier d'activation rouge des trois roues.

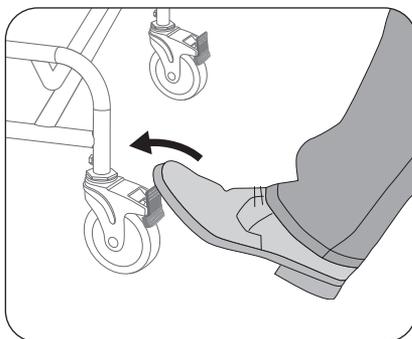


ATTENTION : NE JAMAIS DÉPLACER LE FAUTEUIL LORSQUE LES FREINS SONT APPLIQUÉS, DES BRIS, DES BLESSURES OU LA MORT POURRAIENT EN RÉSULTER.


Utilisation du levier d'activation de la roue directionnelle

La roue directionnelle est située à l'avant à droite et munie d'un levier d'activation vert.

1. Appliquez une pression du bout du pied sur le bas du levier d'activation vert pour limiter la direction.

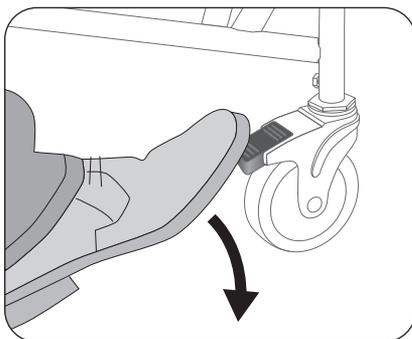


2. Appliquez une pression du bout du pied sur le haut du levier d'activation vert pour libérer la direction.

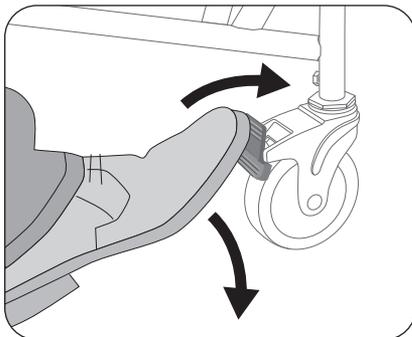


- ✔ La fonction roue directionnelle permet de déplacer le fauteuil en ligne droite sur de plus longues distances. La position avant de celle-ci permet de manœuvrer le fauteuil avec un risque minimum de blessure pour l'intervenant. Diriger un fauteuil en utilisant les roues arrière pour amorcer les virages demande un peu de pratique mais permet que le poids du patient ait peu d'impact sur l'effort à déployer pour tourner. Gardez à l'esprit que vous devez amorcer le virage seulement lorsque la moitié avant du fauteuil a dépassé l'intersection. De plus, gardez toujours une distance d'au moins 12 pouces (30 cm) des murs en déplacement afin de maintenir la marge de manœuvre nécessaire pour corriger la trajectoire.

HAUTEUR SIÈGE/SOL


1. Déterminer si le siège doit être relevé ou abaissé.
2. À l'aide de 2 clés $\frac{1}{2}$ po (13 mm), desserrer les 4 boulons (2 avant et 2 arrière) qui maintiennent le support du siège. **NE PAS LES ENLEVER.**

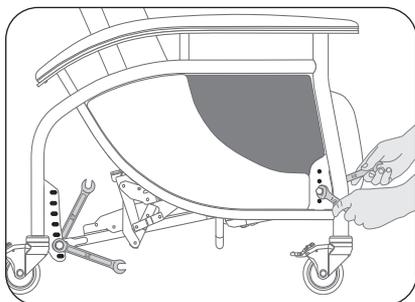

3. Enlever les 2 boulons avant et positionner le support de siège à la hauteur ciblée. **ASSUREZ-VOUS QUE LES DEUX CÔTÉS SONT AU MÊME NIVEAU.** Remettre les boulons sans oublier les rondelles plates et les rondelles-freins.

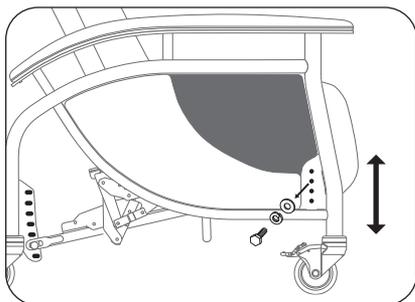

4. Enlever les 2 boulons arrière et positionner le support de siège à la hauteur ciblée afin de donner l'angle d'assise adéquat. **ASSUREZ-VOUS QUE LES DEUX CÔTÉS SONT AU MÊME NIVEAU.** Remettre les boulons sans oublier les rondelles plates et les rondelles-freins.

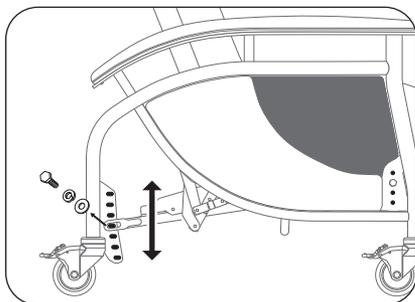

5. **SERRER ADÉQUATEMENT** les 4 ensembles de boulons.




L'ajustement en hauteur [de $17 \frac{1}{2}$ à $20 \frac{1}{2}$ po] se fait selon la longueur de l'avant-jambe de l'utilisateur. Il est important d'avoir les hanches, les genoux et les chevilles à 90 degrés. Les pieds doivent avoir un bon contact avec le sol.


PROFONDEUR D'ASSISE

ATTENTION : LE FAUTEUIL DOIT ÊTRE INOCCUPÉ POUR RÉALISER CET AJUSTEMENT.


1. À l'aide d'une clé $\frac{1}{2}$ po (13 mm), desserrer (NE PAS ENLEVER) les 2 boulons de chaque côté à l'arrière du siège.

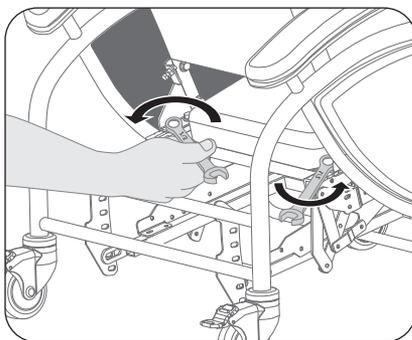

2. Ajuster correctement la profondeur en déplaçant le dossier sur les glissières du siège et resserrer les boulons. Ajuster les 2 côtés à la même profondeur.

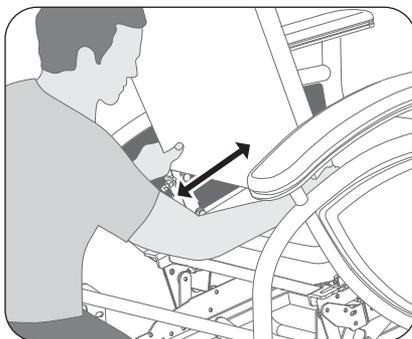

3. Resserrer les boulons de chaque côté que vous aviez desserré.

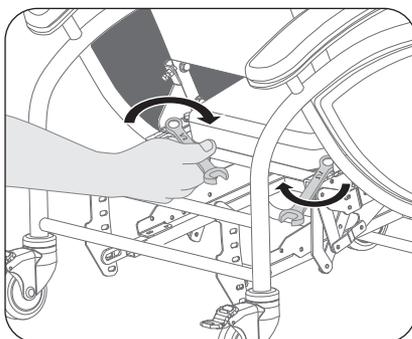


 L'ajustement de la profondeur de l'assise (de 17 à 18 $\frac{1}{2}$ po) se fait selon la longueur de la jambe de l'utilisateur. Il est important que l'arrière du genou appelé le creux poplité soit bien dégagé. Régler la profondeur de l'assise pour que la main passe facilement entre le genou et le coussin de siège. Cet ajustement favorisera un bon contact du siège et du dos au dossier.

ANGLE DE DOSSIER




ATTENTION : LE FAUTEUIL DOIT ÊTRE INOCCUPÉ POUR RÉALISER CET AJUSTEMENT.


1. À l'aide d'une clé $\frac{9}{16}$ po (14 mm), desserrer (NE PAS ENLEVER) les 2 écrous de chaque côté à l'arrière du dossier.

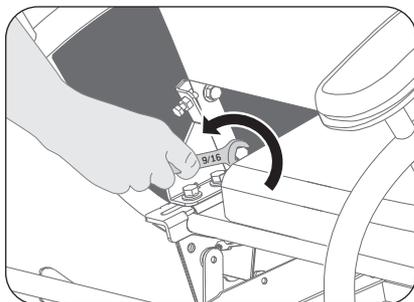

2. Afin d'ajuster l'angle de dossier, desserrer l'écrou de blocage (un de chaque côté).

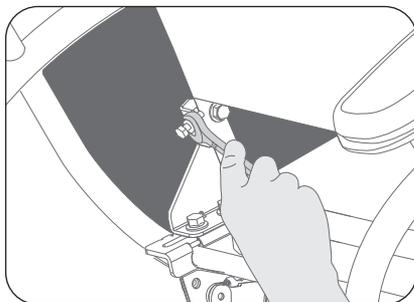

3. Visser ou dévisser le boulon de pression à l'arrière du support de dossier (un de chaque côté) en fonction de l'angle désiré.

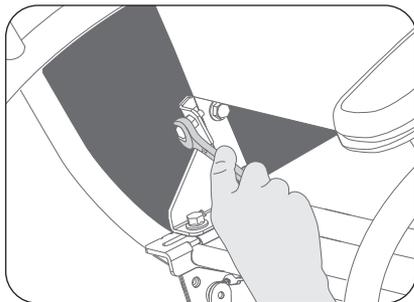

4. Resserrer les écrous de blocage de chaque côté qui avaient été desserrés.



L'ajustement de l'angle du dossier peut varier de 95 à 108 degrés pour accommoder la morphologie dorsale des usagers. Régler l'inclinaison du dossier pour avoir une position de confort avec le bas du dos appuyé ainsi que la tête pour avoir un bon champ de vision devant vous.


Il est possible d'utiliser un support cervical (en option) qui se fixe au dossier avec une courroie. Le support cervical doit être placé à la base de la tête et du cou afin de combler le vide selon le confort de l'utilisateur.

INCLINAISON DU DOSSIER ET ÉLÉVATION DE L'APPUI-JAMBE


 Les freins DOIVENT ÊTRE APPLIQUÉS EN TOUT TEMPS à l'exception des déplacements du fauteuil.

ACTIVATION PAR L'USAGER

1. Afin d'ouvrir l'appui-jambes, une fois assis dans le fauteuil, appliquer une pression sur les appui-bras avec vos bras afin de pousser votre corps vers l'arrière. Ceci activera le mécanisme et ouvrira l'appui-jambes.

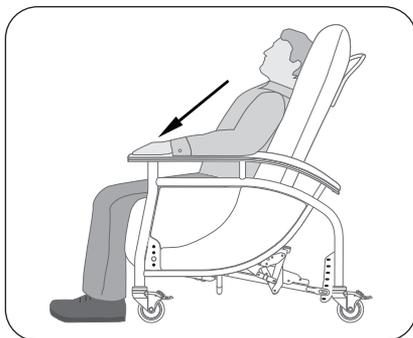


2. Pour incliner le dossier, déplacer le haut de votre corps vers l'arrière tout en poussant sur les appui-bras avec vos bras.

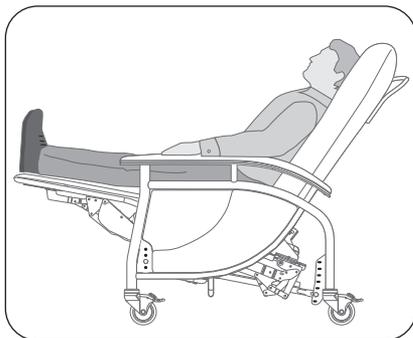


FERMETURE PAR L'USAGER

1. Pour fermer le dossier, déplacer le haut de votre corps vers l'avant tout en tirant légèrement sur les appui-bras avec vos bras.

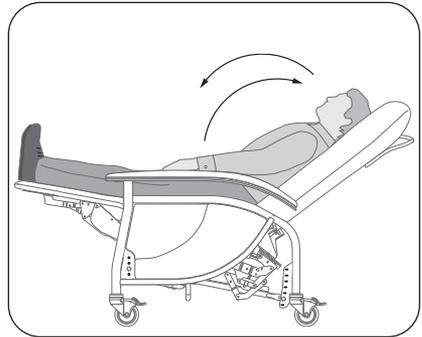

2. Pour fermer l'appui-jambes, appliquer une pression vers le bas avec vos avant-jambes sur l'appui-jambes. Simultanément, tirer légèrement sur le bout des appuis-bras avec vos mains afin que le repose-pied se place sous l'assise.

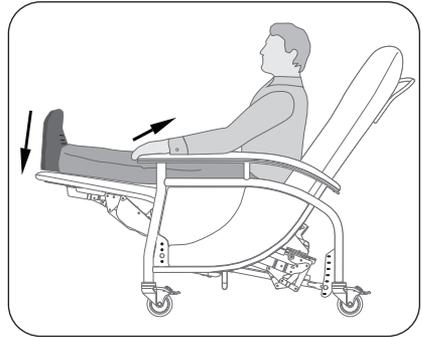


ACTIVATION AVEC L'AIDE D'UN INTERVENANT

1. L'intervenant se place sur le côté du fauteuil à la hauteur de l'utilisateur et il fait face au fauteuil.




2. Puis, il pousse sur le dossier avec une main tandis que l'autre main s'appuie sur l'appui-bras en effectuant un transfert de poids latéral d'une jambe à l'autre. Cette manœuvre permettra au dossier de s'incliner tout en permettant à l'appui-jambes de s'élever simultanément.

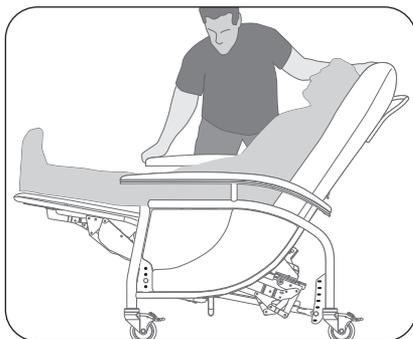

FERMETURE AVEC L'AIDE D'UN INTERVENANT

1. L'intervenant se place sur le côté du fauteuil à la hauteur de l'utilisateur et il fait face au fauteuil. Puis, il tire sur le dossier avec une main tandis que l'autre main s'appuie sur l'appui-bras en effectuant un léger transfert de poids latéral d'une jambe à l'autre. Cette manœuvre permettra au dossier de se redresser.

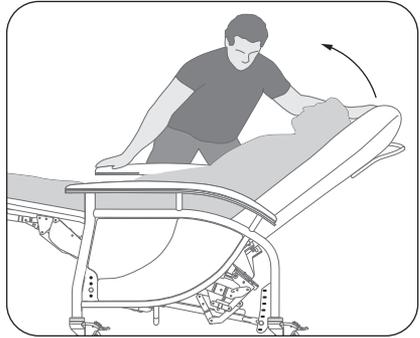

2. L'intervenant pousse vers le bas au centre de l'appui-jambes en s'accroupissant avec le dos droit pour le redescendre et le fermer sous l'assise.



OPTIONS ET ACCESSOIRES DISPONIBLES

Code	Description
C-C1	Tablette latérale gauche et/ou droite
C-C2	Appuis-coudes ajustables en hauteur
C-C3	Ensemble de tige à soluté avec support de fixation installé à l'arrière
C-C3A	Ensemble de tige à soluté avec support de fixation installé à l'avant
C-C3B	Adaptateur pour tige à soluté ronde 1/2"
C-C4	Coussin élévateur pour soins des pieds
C-C5	Ensemble de 4 roues avec frein
C-C6	Appuis-pieds démontables et repliables sur les côtés
C-C7	Coussins protecteurs intérieurs
C-C8	Table frontale
C-C9	Support de rangement de table frontale
C-C10	Coussin Pré-Cure® pro avec appui-jambe assorti en vinyle
C-C11	Appui-bras incliné pour prise de sang
AB-08-H	Appui-tête profilé
AC-04	Coussin de recouvrement de table d'activités
RB-18	Appui-cervical
RA-03	Sangles de retenue de table
RA-03A	Sangle de retenue de table englobante
RA-23	Appuis- latéraux 10 cm (4") avec toile universelle
RA-24	Appuis- latéraux 15 cm (6") avec toile universelle

* Toujours spécifier la couleur, la largeur, le motif du tissu et le numéro de série du fauteuil Harmonie lors de la commande de pièces de remplacement. Voir la page 18 pour l'emplacement du numéro de série. Les pièces de remplacement peuvent avoir de légères différences de couleur avec celles du fauteuil original. LPA Médical ne pourra être tenu responsable pour ces différences.

RECOMMANDATIONS ERGONOMIQUES COMPLÉMENTAIRES

SE RELEVER

Pour se relever du fauteuil Harmonie avec plus d'aisance (toujours en présence d'une autre personne ayant reçu une formation) :

- Appliquer tous les freins.
- Ramener l'inclinaison de dossier en position plus droite et descendre. l'appui-jambes sous l'assise pour la préparation au transfert.
- Glisser le fessier à l'avant de l'assise.
- Ramener vos pieds sous le siège.
- Appuyer les mains sur les appuis-bras.
- Se pencher vers l'avant au niveau du tronc tout en regardant droit devant.

S'ASSEOIR

Pour s'asseoir dans le fauteuil Harmonie de façon sécuritaire (toujours en présence d'une autre personne ayant reçu une formation) :

- Se placer devant le fauteuil en reculant pour toucher l'assise avec l'arrière des genoux.
- Plier les genoux tout en plaçant les mains sur les appuis-bras en s'assoyant sur le siège.
- Glisser le fessier dans le fond de l'assise.

TERMES & CONDITIONS

APPLICABLE POUR LES PRODUITS ACHETÉS À PARTIR DU 1^{er} SEPTEMBRE 2018

GÉNÉRAL

LPA Médical inc. se réserve le droit de modifier sans avis ou obligation la conception, les spécifications et les prix des équipements qu'elle manufacture. Le transport est chargé au prix en vigueur au moment de l'expédition.

Le montant minimal de commande est de 25 \$.

TRANSPORT

Toute marchandise endommagée par le transport devra faire l'objet d'une déclaration immédiate à la livraison, suivie d'une réclamation écrite dans les cinq (5) jours suivants. Une copie de la réclamation devra être envoyée à LPA. Tout dommage non-déclaré durant cette période annulera la garantie **LPA Médical inc.**

Des frais additionnels de manutention et/ou d'utilisation de plate-forme élévatrice lors du déchargement peuvent s'appliquer et sont à l'entière charge du client.

RETOUR DE MARCHANDISE

Aucun retour de marchandise ne sera accepté sans autorisation écrite de notre service à la clientèle. Toute réclamation devra inclure les informations suivantes :

- Les raisons du retour.
- Le numéro de la facture ou du bon de livraison.
- Le numéro du modèle ou de la pièce.
- La quantité de marchandise retournée.

Le retour de marchandise non autorisé ne sera en aucun temps accepté. Tous les retours autorisés devront être envoyés port payé, sauf s'il y a eu erreur dans la commande ou si les items envoyés sont défectueux. Dans ce cas, communiquez avec **LPA Médical inc.** pour des instructions spéciales.

GARANTIE GÉNÉRALE

La garantie **LPA Médical inc.** couvre les défauts de fabrication, pour le propriétaire/utilisateur original, sauf les exclusions mentionnées plus bas, pour les périodes ci-dessous à partir de la date d'achat :

À vie utile* pour la structure métallique des fauteuils.

5 ans sur les structures de bois des fauteuils berçants autobloquants **Thera-Glide® modèles W et T.**

3 ans pour le mécanisme de dossier des fauteuils berçants autobloquants **Thera-Glide®.**

3 ans sur le rembourrage des fauteuils.

2 ans pour tous les autres mécanismes, les vérins de blocage au gaz ou mécanique, les câbles de contrôle, les roues, les tablettes.

1 an sur tous les accessoires achetés séparément des fauteuils et pièces de remplacement.

Si une pièce fait défaut, contacter notre service à la clientèle avec les informations suivantes :

1. Modèle, n° de série et n° de pièce.
2. Date d'achat et numéro de facture.
3. Description du problème.

* La durée de vie utile d'un fauteuil LPA est évaluée à 10 ans.

ENGAGEMENT

LPA Médical inc. s'engage à fournir des pièces de remplacement pour une période de 10 ans après la date d'achat du produit. **LPA Médical inc.** se réserve le droit de fournir des pièces de remplacement au design différent que celui de la pièce remplacée, à sa seule discrétion.

L'obligation de **LPA Médical inc.** se limite expressément à corriger le défaut par l'ajustement, réparation ou remplacement de l'équipement, à la seule discrétion de LPA.

EXCLUSION

- Usure normale.
- Dommages dus à l'eau ou au feu, incluant les dommages causés par les laveuses à pression et laveuses de fauteuils roulants automatiques.
- Rouille du métal et recouvrement abîmé.
- Réparation ou modification non autorisée ou faite avec d'autres pièces que celles d'origine.
- Dommages dus à un usage anormal ou abusif.
- Dommages causés par une exposition aux intempéries.

LISTE DES PIÈCES

N°	Code	Description
1	CP-1100-20	Structure de base C-207
2	CP-1210-20	Support de mécanisme C-207
3	CP-1220-20	Structure d'assise C-207
4	CP-1230P	Paire de mécanismes C-207
5	CP-1310-20	Ensemble ajustement de dossier C-207
6	CP-1320P	Paire de plaques d'ajustement de dossier C-207
7	CP-1325-20	Structure de dossier C-207
8	CP-1326-20	Barre de poussée C-207
9	PE65019	Panneau plastique latéral droit
10	PE65020	Panneau plastique latéral gauche
11	PE65021	Plaque plastique intérieure d'appui-jambes
12	PE65022	Plaque plastique avant d'appui-jambes
13	PE65024	Plaque plastique centrale d'appui-jambes
14	PE65028	Protection plastique d'appui-bras
15	SW-05	Roue pivotante avec frein 4" (10 cm)
16	SW-10	Roue directionnelle 4" (10 cm)
17	CU-01	Bandes élastiques pour dossier (6)
18	CU-02	Coussin de dossier C-207*
19	CU-03	Coussin de siège C-207*
20	CU-04	Coussin d'appui-bras (simple) C-207*
21	CU-06	Paire de coussins latéraux C-207*
22	CU-07-R	Coussin appui coude droit vinyle noir C-207 (C-C2)
23	CU-07-L	Coussin appui coude gauche vinyle noir C-207 (C-C2)
24	CU-10	Paire de coussins protecteurs intérieurs C-207 (C-C7)*
25	CP-1510	Tablette latérale (C-C1)
26	CP-1610-20	Structure d'ajustement hauteur appui-coudes (C-C2)
27	CP-1620-20	Structure support appui-coudes (C-C2)
28	CP-200	Appui-bras prise de sang (C-C11)
29	CP-1710R	Support pour tige à soluté avant droit (C-C3A)
30	CP-1710L	Support pour tige à soluté avant gauche (C-C3A)
31	CP-1715R	Support pour tige à soluté arrière droit (C-C3)
32	CP-1715L	Support pour tige à soluté arrière gauche (C-C3)
33	CP-1720	Poteau de support de tige à soluté (C-C3)
34	CP-1730	Section tige à soluté (C-C3)
35	PE65030	Protecteur de plastique appui-coudes (C-C2)
36	CP-01-20	Table frontale (C-C8)
37	AB-08-H	Appui-tête profilé
38	RB-18	Appui cervical
39	C-C4	Coussin élévateur pour soins des pieds*
40	C-C10	Coussin Pré-cure® Pro avec appui-jambe assorti en vinyle

* Toujours spécifier la couleur, la largeur, le motif du tissu et le numéro de série du fauteuil lors de la commande de pièces de remplacement. Voir la page 18 pour l'emplacement du numéro de série. Les pièces de remplacement peuvent avoir de légères différences de couleur avec celles du fauteuil original. LPA Médical ne pourra être tenu responsable pour ces différences.

VUE ÉCLATÉE EXPLODED VIEW

